

乳汁を使って妊娠確認検査

パグ

PAGs検査

始めてみませんか？



1 検体 600 円 (税抜)

簡単!

いつでも、だれでも、乳汁で!

- 人工授精後28日目から妊娠確認が可能
- サンプルは農協経由で送付可能
- 牛へのストレスフリー

利益アップ!

空胎ロスが儲けに変わる!!

- 初回確認 + 継続確認で流産の見逃しを防止

※オススメ使用例

初回確認

28~35日目

継続確認

65~75日目

継続確認

100日目~乾乳

ご利用の流れ

1. 検査する牛をチェックします

人工授精後**28日目**以降かつ
分娩後**60日目**以降の牛が対象です。

対象牛のチェックは
牛群検定WebシステムDL
が便利！



2. 依頼申込書を作成してください

依頼申込書に事前に送付するラベルの
半券を貼り、

① 申込日 ② 個体識別番号 ③ AI日を
ご記入ください。

※②は10桁で記入 ※③は任意項目

PAGs (妊娠関連糖タンパク) 検査 依頼申込書												
ラベル貼付										人工授精日		
個体識別番号										12/3		
1	農協 1111 00 1111 連番 111	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	12/3

3. 乳汁を採取し、 ラベルの半券をチューブにお貼りください

- 対象牛以外の乳汁が混ざらないようにご注意ください。
- 前搾り、後搾りの乳汁も使用できます。
- 乳房炎治療中の分房からの採取はお控えください。
- 防腐剤(プロノポールなど)も添加できます。



4. 乳汁と依頼申込書を送付します

- 「地区で決められた集約方法」で本会まで送付してください。
- サンプルは生ものの為、**冷蔵で保管**ください。
(送付まで3日以上要する場合は、冷凍で保管ください)



5. 結果はJAよりお受け取りください

本会よりJAに結果報告しますので、JAより所定の方法でお受け取りください。
結果は + / - / ± のいずれかでお返しします。

※牛番号, AI日は依頼申込書に記入した内容を表示します

PAG依頼検査結果 (農家別)					報告日
					検査日
					(23社) 北海道酪農検定検査協会
					検査 事業所
JA名	99	99999999	酪検 太郎		2018/10/23
連番	結果	PAG	個体識別番号	AI	
52	-	-0.006	1111111111	9/15	2018/10/16
53	-	-0.003	1234567890	9/15	
54	+	2.663	1234512340	9/13	
合計本数	3		+ 高値 - 低値 ± 判定保留		

連番	結果	PAG	個体識別番号	AI
52	-	-0.006	11111 11111	9/15
53	-	-0.003	12345 67890	9/15
54	+	2.663	12345 12340	9/13

お問い合わせは所属JAまで



公益社団法人
北海道酪農検定検査協会
Hokkaido Dairy Milk Recording & Testing Association